


Antigen-Nasenbohrertests für Schülerinnen und Schüler (LEPU-Selbsttest)


Nur 2-3 Zentimeter tief in der eigenen Nase drehen!
Kurz und schmerzlos! Ergebnis in 15-20 Minuten!

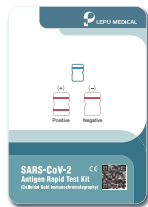

Was braucht man dazu?



Testkarte

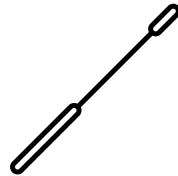


Stäbchen mit Tupfer




Lösung

Wie funktioniert's?

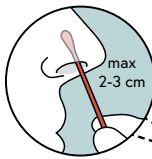


Schritt 1:

- Tupfer **NUR 2-3 Zentimeter** in die Nasenhöhle stecken
- Tupfer 5 Mal im Kreis drehen
- Nasenhöhle wechseln, Drehen wiederholen

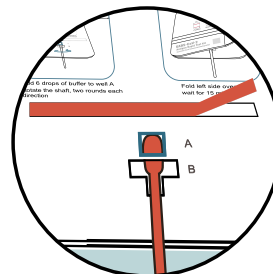


Schritt 2:

- Schutzabdeckung des Klebestreifens entfernen und Probe in die Öffnung schieben

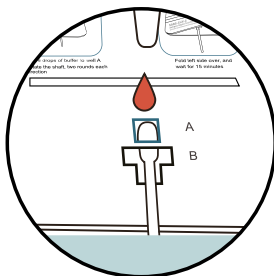

Schritt 3:

- 6 Tropfen der Lösung in die Vertiefung geben und Tupfer 2 Mal in jede Richtung drehen

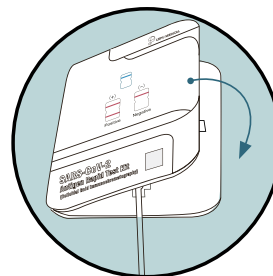

Schritt 4:

- Linke und rechte Seite zusammenkleben
- Testergebnis erscheint in 15-20 Minuten



Schritt 5:

- COVID-19 NACHGEWIESEN:
Die Schule informiert die örtliche Gesundheitsbehörde und die Eltern/ Erziehungsberechtigten.
- COVID-19 NICHT NACHGEWIESEN:
Herzlichen Glückwunsch, gesund bleiben und weiter die Schule besuchen!