



ANLEITUNG ZUM ANTIGEN-NASENBOHRER- TEST (FLOWFLEX-SELBSTTEST)

EXTRAKTIONSPUFFERRÖHRCHEN



EINWEGTUPFER



TESTKASSETTE

SICHERE SCHULE
www.sichereschule.at

Bundesministerium
Bildung, Wissenschaft
und Forschung

COVID-19 NACHGEWIESEN
DIE SCHULE INFORMIERT ELTERN/
ERZIEHUNGSBERECHTIGTE UND
DIE ÖRTLICHE GESUNDHEITSBEHÖRDE.

COVID-19 NICHT NACHGEWIESEN
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH, GESUND BLEIBEN
UND WEITER DIE SCHULE BESUCHEN!

WICHTIG

- 30 MINUTEN VOR DEM TEST
NICHT ZÄHNE PUTZEN, ESSEN ODER RAUCHEN.
- WASSER TRINKEN IST ERLAUBT!

1

- Schnäuzen vor dem Test
- Halterung zusammenbauen
- Röhrchen mit Pufferlösung aufschrauben und in die Halterung stellen, ohne es zu drücken
- Stäbchenverpackung mit einer Schere aufschneiden

2

- Tupfer ca. 2,5 Zentimeter in ein Nasenloch einführen
- Das Stäbchen 5 Mal drehen, dabei sanft gegen die Schleimhaut pressen
- Vorgang im anderen Nasenloch wiederholen

3

- Röhrchen mit Pufferlösung aus der Halterung nehmen
- Das Stäbchen einführen und 30 Sekunden umrühren
- Röhrchen zusammendrücken und währenddessen das Stäbchen mindestens 5 Mal drehen
- Aufpassen, dass Flüssigkeit nicht aus dem Röhrchen spritzt!

4

- Stäbchen entnehmen und dabei Röhrchen zusammendrücken
- Gebrauchtes Stäbchen wieder in die Verpackung schieben
- Kappe mit Tropferspitze fest aufdrehen
- Röhrchen wirbeln und schütteln

5

- Testkassette aus der Verpackung nehmen und flach auf den Tisch legen
- Kappe von der Tropferspitze abdrehen
- Röhrchen vorsichtig zusammendrücken und 4 Tropfen auf Testkassette tropfen (Vertiefung S)

6

- 15 Minuten warten
- Das Ergebnis ablesen

7

Ergebnisinterpretation

- NEGATIV
- POSITIV
- UNGÜLTIG